

パソコンスタンド パソッテル ペチャラ用

●パソッテル ペチャラ用

特徴

パソッテル ペチャラ用はベッドに寝た姿勢でボイスキャリーペチャラを見られるように保持し高さや角度を調整するものです。 シンプルで取付簡単 H型フレームとU型フレームの選択にはベッド下の条件や介助時の取り回しなどをご考慮のうえお選びください



H型ペチャラ用 オレンジ



H型ペチャラ用 ブラック



U型ペチャラ用 オレンジ



U型ペチャラ用 ブラック

詳細

1. パソッテルの脚がベッド下に入り込むスペースがあるかご確認ください
パソッテルの脚は床から62mmあります
2. ペチャラの角度調整方法はBタイプのみです
3. フレームの型をお選びください H型フレームとU型フレームがあります
4. フレームの色をお選びください オレンジとブラックの2種類あります

取付部

取付けはペチャラのベルト通し穴にステンレス棒を挿入し
保持します

シンプルですがきっちり固定されますので真下に向けても
安心してお使いいただけます

**角度調整はBタイプ金具のみ****Bタイプ金具は**

水平バーを中心に上向き下向きの調整と左右移動機能に合
わせ

弊社独自開発の定圧ボールジョイントを合体させることで角
度調整が可能に！

これによりベッドの右側、左側、頭上側のいずれからパソッテ
ルを設置し直しても水平バーからペチャラ用プレートを抜き
差しせずにペチャラ位置を調整できます

(定圧ボールジョイントとはクランプレバーを緩めても一気に
姿勢を崩さないボールジョイントです)

**Bタイプ金具****支柱落下防止の安全対策**

支柱高さの調整はなるべくセーフティーロックピンの入る位置で
お決めください


その後で支柱ロックノブを確実に締付けてください

やむを得ずセーフティーロックピンが入らない位置での高さの場合は
特に支柱ロックノブの固定を確実に行ってください


万が一支柱ロックノブが緩んでもセーフティーロックピンが支えますが
確実な固定をお願いします



寸法図

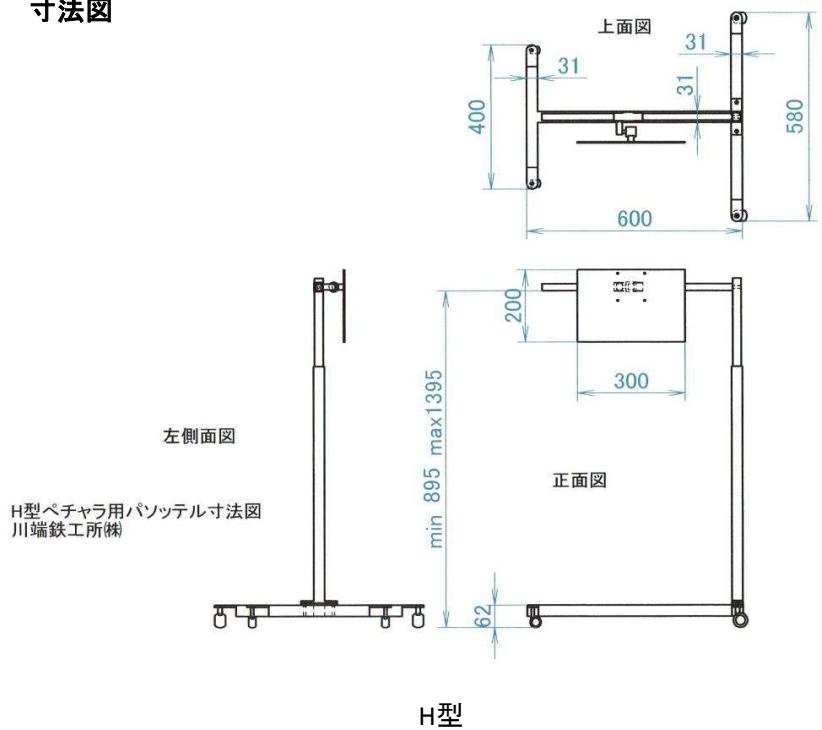

H型

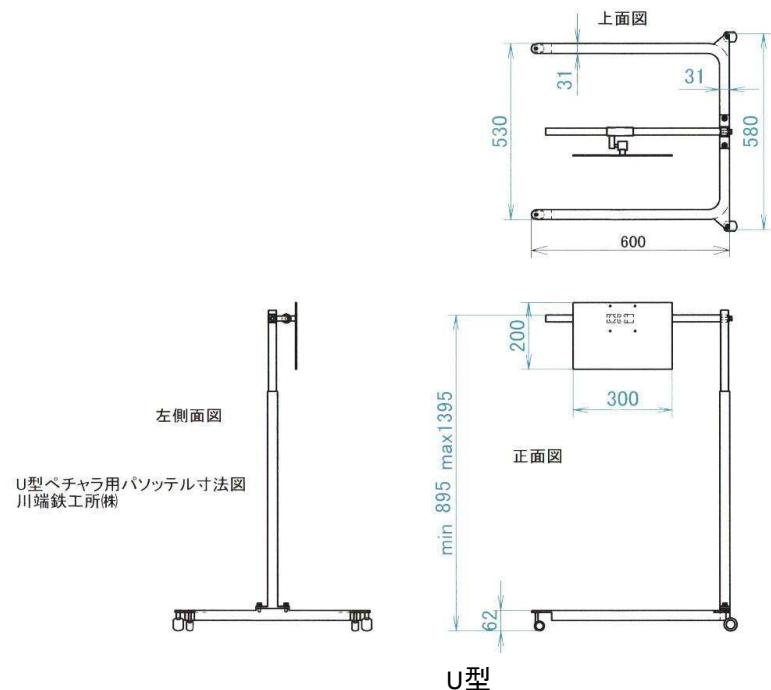

U型

その他

4輪自在キャスター 支柱側2輪にロック機能あり色オレンジ, ブラックの2種類

耐荷重 H型、U型ともに6kg

重量 H型、U型ともに8kg

またオーダー対応もしております、お問い合わせください

取扱店

製造元 川端鉄工所株
〒929-0126 石川県能美市山口町木30-2
TEL 0761-21-0993 FAX 0761-21-7180
<http://kw-tk.com/> e-mail info@kw-tk.com